

Contact Contact N

- MANUAL DE USUARIO -



BIOTECH DENTAL

Recomendaciones de uso

Los implantes **Kontakt** y **Kontakt N** están destinados a profesionales con la debida formación en implantología.

Deben contar con el kit quirúrgico actualizado de Kontakt, que incluye instrumentos diseñados para los implantes Kontakt y Kontakt N.



La información en este documento es específica para los implantes Kontakt y Kontakt N

Los sistemas Kontakt y Kontakt N deben utilizarse únicamente con componentes e instrumentos de la gama Kontakt de Biotech Dental y de acuerdo con las instrucciones de uso, protocolos y recomendaciones descritos en la documentación proporcionada por nuestra empresa.

El profesional es responsable de cualquier complicación que pueda derivarse del uso no conforme a nuestras recomendaciones o de una asepsia inadecuada. Bajo ninguna circunstancia, Biotech Dental podrá ser considerada responsable de estas complicaciones.

ÍNDICE

1. IMPLANTES KONTACT & KONTACT N	P.4
1. Principios y beneficios	p.5
2. Características	p.5
3. Embalaje y referencias	p.11
2. CIRUGÍA	P.14
1. Kit quirúrgico	p.15
2. Instrumental específico	p.19
3. Protocolos de colocación	p.22
4. Topes de fresado	p.26
5. Calibrador de tejido periodontal	p.28
6. Tornillos de cicatrización	p.28
3. KIT PROSTÉTICO	P.30
4. INFORMACIÓN GENERAL	P.32

1

IMPLANTES KONTACT & KONTACT N



1. Principios y beneficios


Los implantes Kontakt y Kontakt N comparten el mismo diseño y conexión, y se **benefician de las siguientes ventajas:**

- > **Estabilidad del tejido** gracias a la conexión de cono Morse, el *platform switching* y el perfil cóncavo de la parte transgingival del pilar. La conexión STSystem reduce la infiltración bacteriana.
- > **Alta resistencia mecánica** gracias al diseño patentado de la conexión STSystem™: la amplia superficie de contacto entre el implante y el pilar aumenta la fricción, reduce los micromovimientos y garantiza la retención y estabilidad del pilar.
- > **Simplicidad y versatilidad protésica:** una única conexión STSystem para todos los diámetros de implantes* que simplifica la gestión del inventario y los procedimientos protésicos, tanto en la clínica como en el laboratorio.

2. Características


DISEÑO

Los implantes Kontakt y Kontakt N comparten el **mismo diseño** y la **misma conexión**.

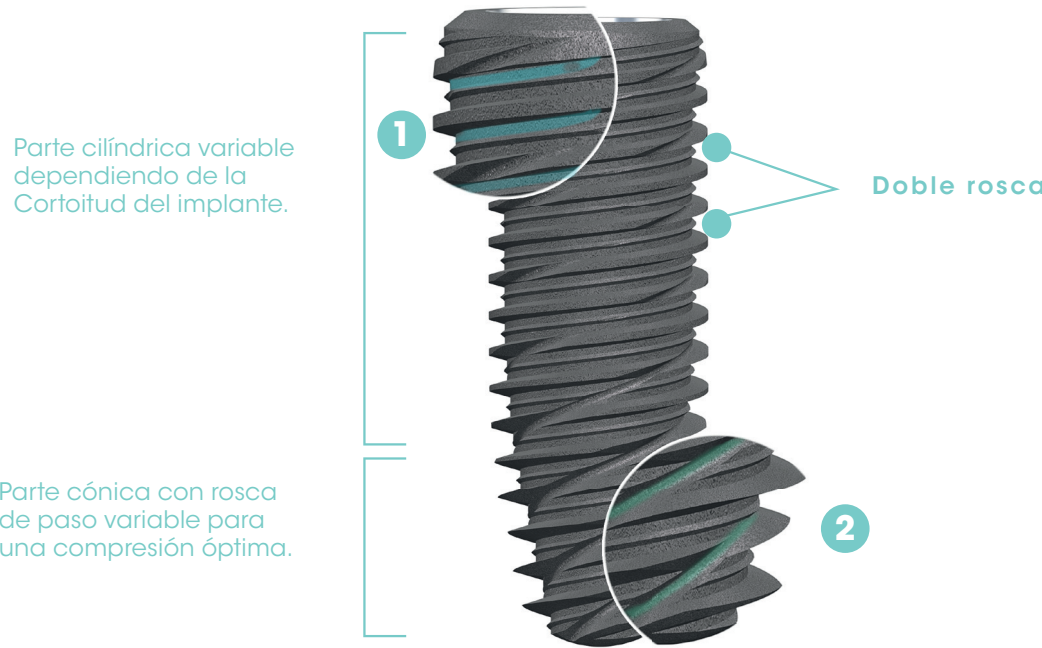

- 1 Rosca secundaria "Surface Increaser": Aumenta la superficie de contacto para una mejor distribución de las fuerzas en el hueso.
- 2 Perfil de "hoja constante" auto-roscante a lo largo de la altura del implante: Reduce las tensiones e incrementa la estabilidad durante la inserción.

* Excepto para el diámetro de 3 mm.

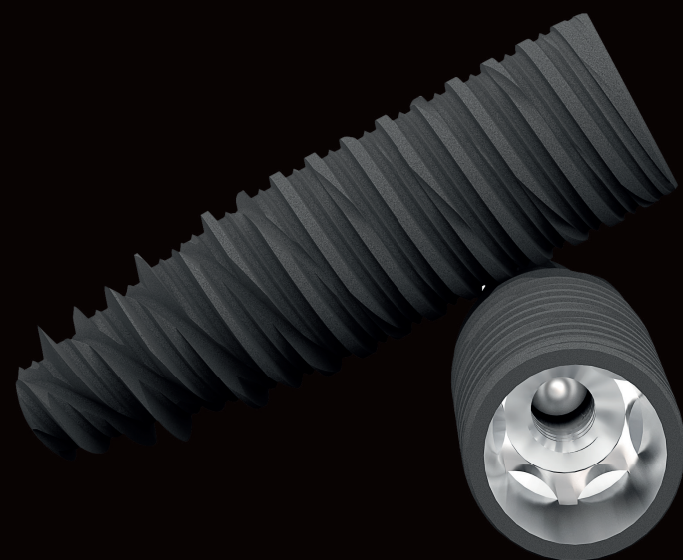


- ✓ Material: Titanio grado 5, que combina biocompatibilidad y resistencia.
- ✓ Perfil cilíndrico-cónico.
- ✓ Cuello chaflanado y microestructurado para el implante Kontakt y nanoestructurado para el implante Kontakt N.
- ✓ Platform switching.
- ✓ Conexión patentada STSystem.
- ✓ Doble rosca.
- ✓ Ápice esférico atraumático.
- ✓ Kit quirúrgico único para todos los implantes de las gamas Kontakt, Kontakt N, Kontakt S, Kontakt S+, Kontakt PL, Kontakt MB.

CONEXIÓN SIX-THREE SYSTEM (STSYSTEM)

La gama Kontakt tiene un sistema de conexión de cono Morse.

Este sistema estabiliza y sella la conexión pilar-implante y ofrece beneficios mecánicos comprobados:

- ✓ Resistencia a la tracción y la flexión: las piezas están bloqueadas,
- ✓ Sin micromovimientos, deformación ni fTadoo del tornillo.

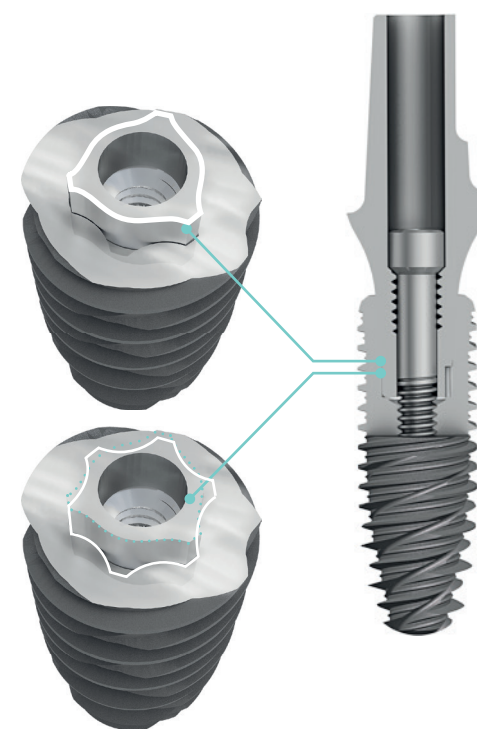

- ✓ Resistente
- ✓ Sellado
- ✓ Fácil de insertar
- ✓ Posicionamiento rápido y fiable




Los implantes Kontakt y Kontakt N están diseñados para soportar prótesis de la gama Kontakt; la conexión idéntica en toda la gama garantiza la compatibilidad con los pilares.

Características técnicas

- 3 puntos de indexación en las partes protésicas,
- 6 opciones de reposicionamiento.

La conexión Six-Three System permite el uso tanto de pilares indexados como no indexados.

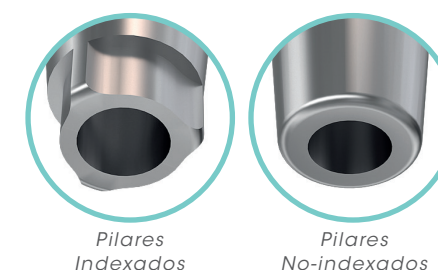


CONEXIÓN EN IMPLANTES DE 3.0 MM

Los implantes Kontakt y Kontakt N con un diámetro de 3.0 mm tienen una conexión diferente. Esta conexión tiene un indexado hexagonal por impresión ranurada. Los implantes de 3.0 mm están destinados a espacios pequeños. Pueden usarse para reemplazar incisivos mandibulares y laterales superiores.

También pueden emplearse para crear coronas individuales, cementadas o retenidas por tornillo.

3.0 mm de diámetro

Indexado hexagonal por impresión ranurada para el implante Ø 3.0 mm

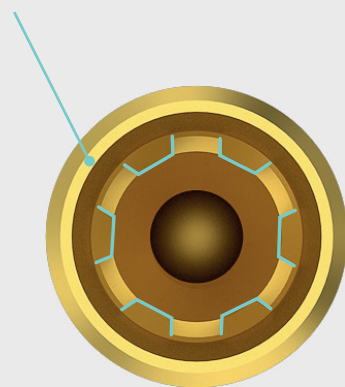



Todos los componentes e instrumentos de la gama de implantes Ø 3.0 mm están identificados por su color amarillo y pueden reconocerse en este manual porque están enmarcados por líneas discontinuas amarillas



ESTUDIO DE INTERFAZ PILAR / IMPLANTE

Para el implante Kontakt, un estudio que evaluó la calidad de la conexión sellada entre la fase protésica y el implante destacó la fiabilidad de nuestro sistema.

Demstró que nuestro ensamblaje cumplió con todos los requisitos de sellado necesarios (datos preclínicos de Biotech Dental - Estudio 30/12/2013).

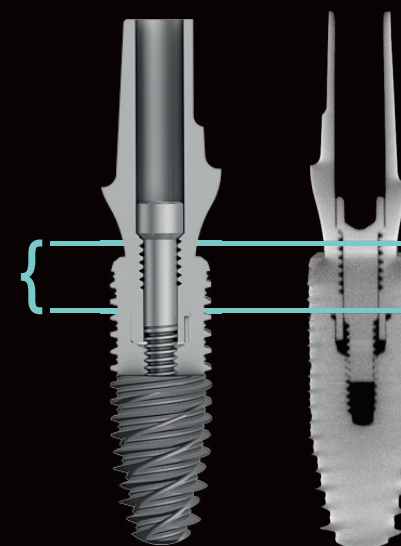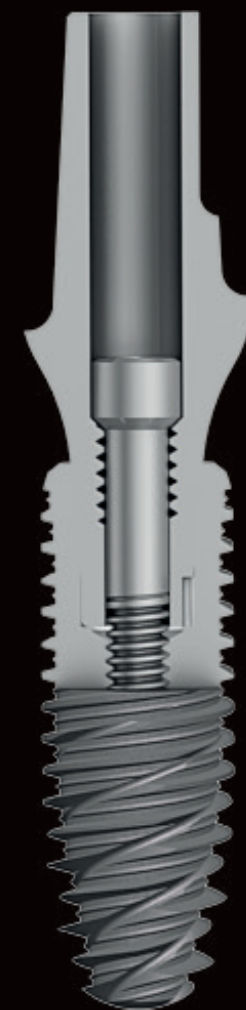

Interfaz pilar-implante probada

DIPOSITIVO DE ENSAMBLADO


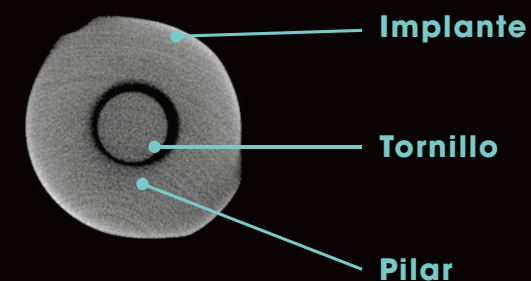


Ilustración de la junta sellada entre el pilar y el implante.

Idéntico para Kontakt y Kontakt N

PLATFORM SWITCHING



Los implantes de las gamas Kontakt y Kontakt N se benefician del platform switching, que consiste en usar **pilares protésicos con un diámetro de emergencia más pequeño que el diámetro del cuello del implante**. Esto **mejora la estabilidad ósea** (reduciendo la reabsorción ósea periimplantaria) y los resultados estéticos.

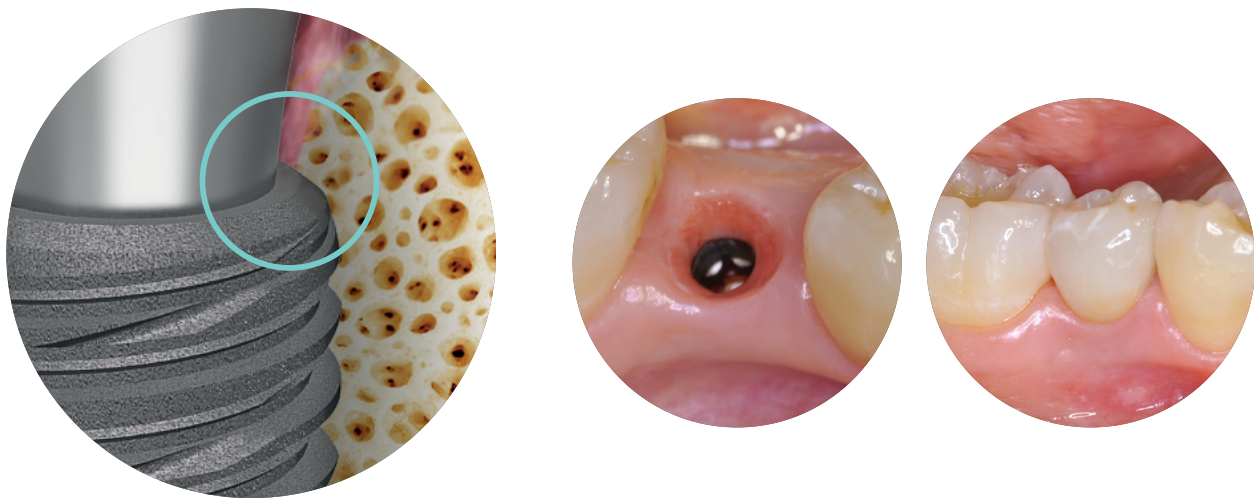

3. Embalaje


Características del embalaje

- ✓ Embalaje externo de cartón con doble barrera estéril.
- ✓ Etiquetas de trazabilidad que contienen toda la información del implante (4 etiquetas para el paciente).
- ✓ Portaimplante estable para su colocación en el espacio quirúrgico.
- ✓ Tornillo de cierre corto entregado con el implante.
- ✓ Tornillo de cierre de alta calidad **entregado de forma gratuita bajo solicitud**.
- ✓ Collar de titanio y tope a ambos lados del implante para evitar el contacto con el plástico.
- ✓ Etiqueta que indica las dimensiones del implante en el portaimplantes.

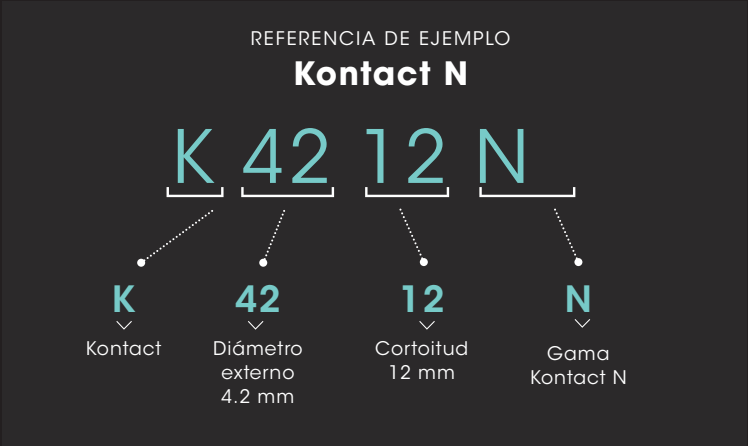
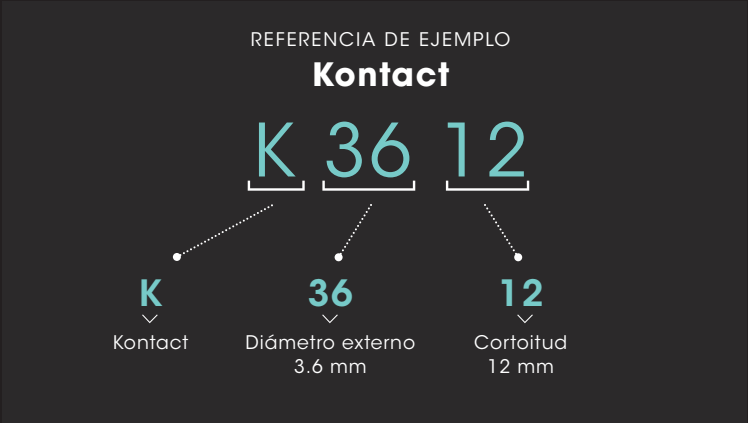


Para el embalaje, las indicaciones y el protocolo de los implantes Kontakt en Cortoitudes de 20 mm, 22 mm y 24 mm, consulte el protocolo específico ref. KONXL-PT-1-EN.


- 1 Abra el embalaje de cartón, cerrado con sellos a prueba de manipulaciones
- 2 Abra el blíster que contiene el portaimplante (2ª barrera estéril)
- 3 Coloque el portaimplante en el espacio estéril y abra la segunda tapa (1ª barrera estéril)
- 4 Sujete el implante con el transportador dedicado
- 5 Coloque el implante

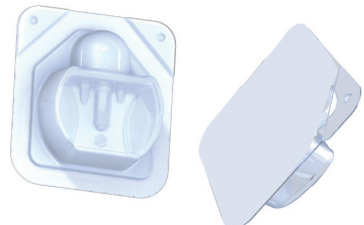


REFERENCIAS PARA IMPLANTES **KONTACT**

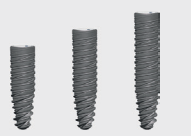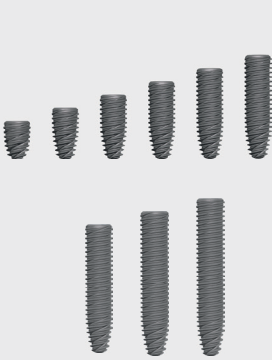	Referencias	Diámetro	Cortoidud
	K30-10	Ø 3 mm	10 mm
	K30-12		12 mm
	K30-14		14 mm
	K3608	Ø 3.6 mm	8 mm
	K3610		10 mm
	K3612		12 mm
	K3614		14 mm
	K3616*		16 mm
	K3620		20 mm
	K3622		22 mm
	K3624		24 mm
	K4206	Ø 4.2 mm	6 mm
	K4208		8 mm
	K4210		10 mm
	K4212		12 mm
	K4214		14 mm
	K4216*		16 mm
	K4220**		20 mm
	K4222**		22 mm
	K4806	Ø 4.8 mm	6 mm
	K4808		8 mm
	K4810		10 mm
	K4812		12 mm
	K4814		14 mm
	K5406	Ø 5.4 mm	6 mm
	K5408		8 mm
	K5410		10 mm
	K5412		12 mm
	K5414		14 mm

Recomendaciones
sobre el diámetro del
implante

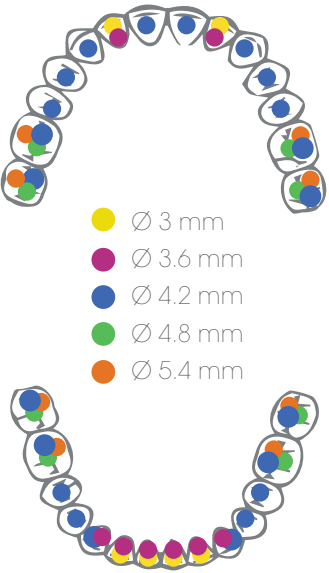

REFERENCIAS PARA IMPLANTES **KONTACT N**

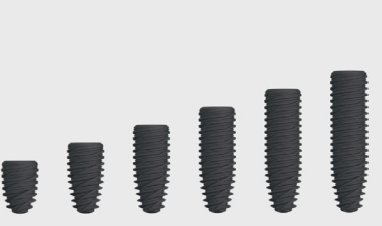	Referencias	Diámetro	Cortoidud
	K3010N	Ø 3 mm	10 mm
	K3012N		12 mm
	K3014N		14 mm
	K3608N	Ø 3.6 mm	8 mm
	K3610N		10 mm
	K3612N		12 mm
	K3614N		14 mm
	K3616N*		16 mm
	K4206N	Ø 4.2 mm	6 mm
	K4208N		8 mm
	K4210N		10 mm
	K4212N		12 mm
	K4214N		14 mm
	K4216N*		16 mm
	K4806N	Ø 4.8 mm	6 mm
	K4808N		8 mm
	K4810N		10 mm
	K4812N		12 mm
	K4814N		14 mm
	K5406N	Ø 5.4 mm	6 mm
	K5408N		8 mm
	K5410N		10 mm
	K5412N		12 mm
	K5414N		14 mm

*Las fresas para implantes de 16 mm, 20 mm, 22 mm y 24 mm no se suministran con el kit quirúrgico, pero están disponibles bajo petición
**Para el embalaje, las indicaciones y el protocolo de los implantes Kontakt de Cortoidudes de 20 mm, 22 mm y 24 mm, consulte el protocolo específico ref. KONXL-PT-1-EN.

*Las fresas específicos para el implante de 16 mm no se sumini stran con el kit quirúrgico, pero están di sponibles como opción.


2

CIRUGÍA


Un kit quirúrgico único para todas las gamas de implantes Kontakt

- 1 Fresa de marcado Ø 1.5 mm
- 2 Fresas piloto Ø 2 mm
- 3 Calibradores axiales
- 4 Taladros escalonados cortos
- 5 Taladros escalonados largos
- 6 Fresas cortas
- 6b Fresas largas
- 7 Transportadores de implantes
- 8 Broca para extractor de implantes
- 9 Destornillador
- 10 Llave de torque para cirugía
- 11 Extensión de fresas

1. Kit quirúrgico



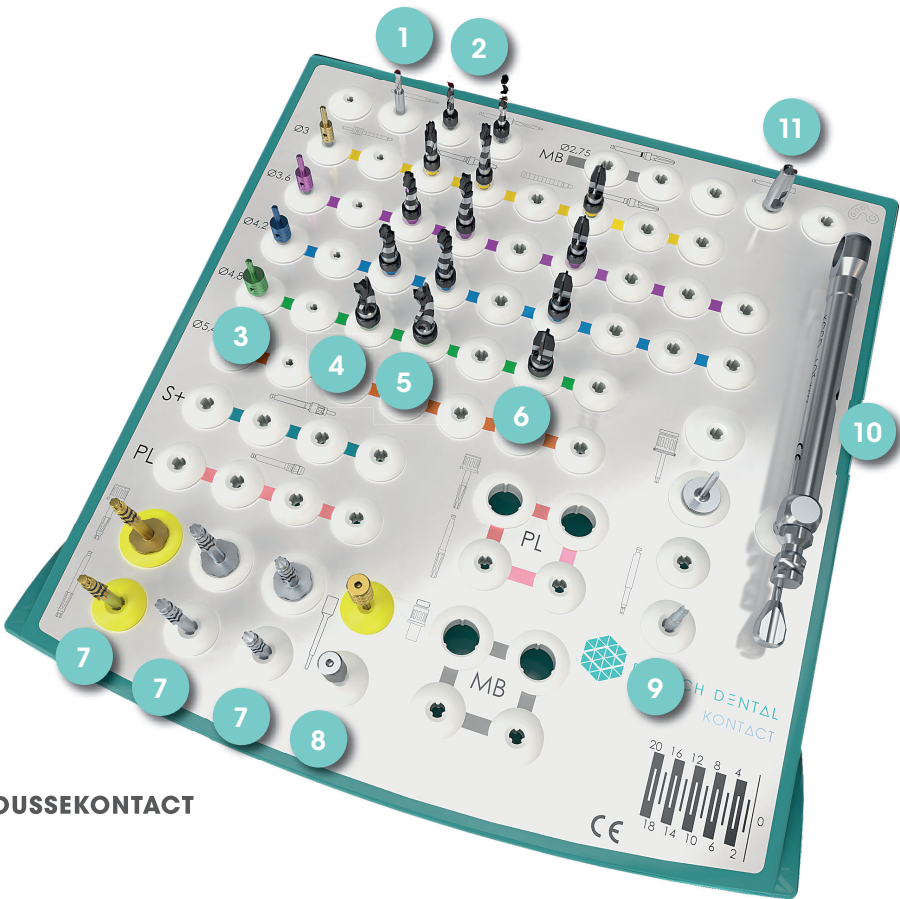


Ref.: TROUSSEKONTACT

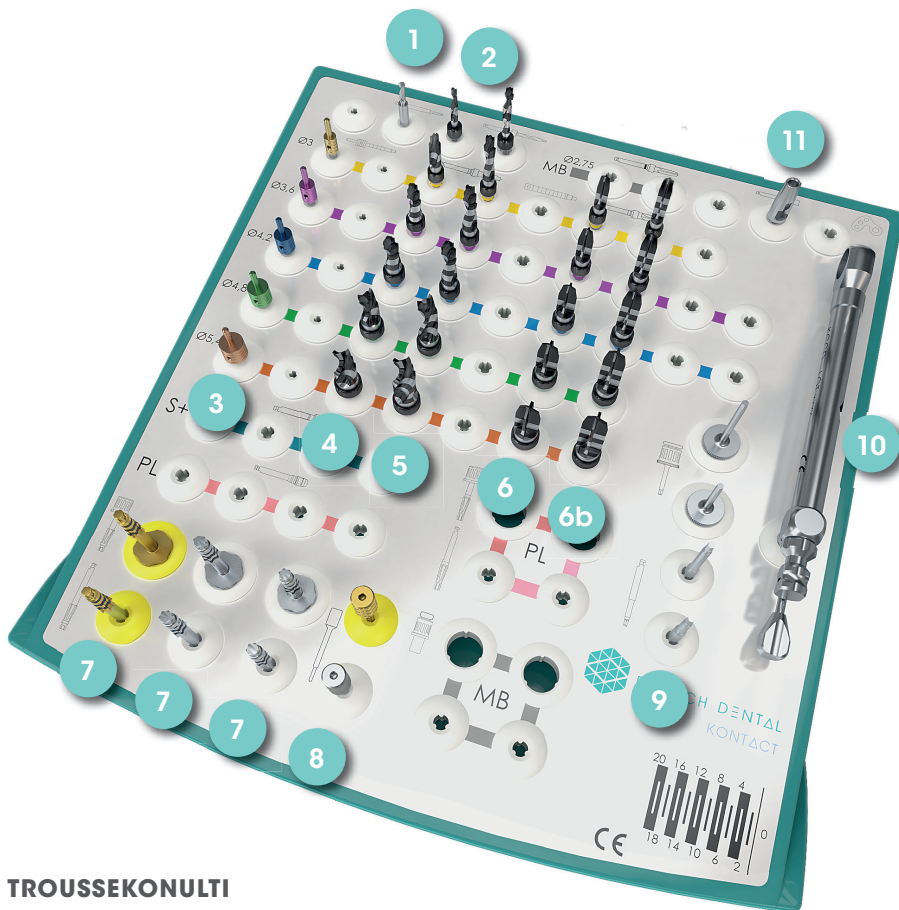

Ref.: TROUSSEKONULTI

REFERENCIAS DEL INSTRUMENTAL

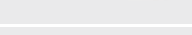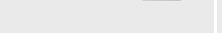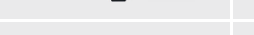	Referencia	Descripción	Diámetro del implante	Cortoidad
	ESP	Espaciador paralelizador		
	K30EX	Extractores de pilares	Ø 3.0 mm	Corto
	K30EXL			Corto
	KEXC	Extractores de pilares		Corto
	KEXLC	Extractores de pilares		Corto
	KEX	Extractores de pilares	Todo Ø	Corto
	KEXL			Corto
	KEXV	Extractores de pilares (con tornillo roto)		
	1001SI	Marcado Ø1.5 mm sin irrigación		
	KFT	Marcado con punta trocarter		Corto
	KFTL			Corto
	KFE20	Piloto Ø 2 mm		Corto
	KFE20L			Corto
	KFE20XL			
	KFE2016*			16 mm
	KJA30	Calibrador axial	Ø 3.0 mm	
	KJA36	Calibrador axial	Ø 3.6 mm	
	KJA42		Ø 4.2 mm	
	KJA48		Ø 4.8 mm	
	KJA54		Ø 5.4 mm	

Optional por TROUSSEKONTACT
Optional por TROUSSEKONULTI

Instrumentos específicos para la gama de implantes de Ø 3 mm.

	Referencia	Descripción	Diámetro del implante	Cortoidad	Color
	KFE30	Escalonados	Ø 3.0 mm	Corto	
	KFE30L			Largo	
	KFE3016*			16 mm	
	KFE30XL			XL	
	KFE36	Escalonados	Ø 3.6 mm	Corto	
	KFE36L			Largo	
	KFE3616*			16 mm	
	KFE36XL			XL	
	KFE42	Escalonados	Ø 4.2 mm	Corto	
	KFE42L			Largo	
	KFE4216*			16 mm	
	KFE42XL			XL	
	KFE48	Escalonados	Ø 4.8 mm	Corto	
	KFE48L			Largo	
	KFE54	Escalonados	Ø 5.4 mm	Corto	
	KFE54L			Largo	
	KF30	Fresas	Ø 3.0 mm	Corto	
	KF30L			Largo	
	KF36	Fresas	Ø 3.6 mm	Corto	
	KF36L			Largo	
	KF3616*			16 mm	
	KF42	Fresas	Ø 4.2 mm	Corto	
	KF42L			Largo	
	KF4216*			16 mm	
	KF48	Fresas	Ø 4.8 mm	Corto	
	KF48L			Largo	
	KF54	Fresas	Ø 5.4 mm	Corto	
	KF54L			Largo	

Instrumentos específicos para la gama de implantes de Ø 3 mm.

Optional por TROUSSEKONTACT
Optional por TROUSSEKONULTI

*Las fresas para implantes de 16 mm no se suministran con el kit quirúrgico, pero están disponibles como opción bajo solicitud.




2. Instrumental Específico

TREFINAS PARA LA EXTRACCIÓN DE IMPLANTES




La extracción de implantes requiere una trefina de extracción. Hay una trefina para cada diámetro de implante.

⌚ **Uso recomendado:** 500 a 800 rpm con irrigación.

	Referencia	Descripción	Interno ø	Externo ø	Cortitud máxima interna
	KTEI30	Trefinas para la extracción de implantes	3.4 mm	4.0 mm	18 mm
	KTEI36		4 mm	4.6 mm	
	KTEI42		4.6 mm	5.2 mm	
	KTEI48		5.2 mm	5.8 mm	
	KTEI54		5.8 mm	6.4 mm	

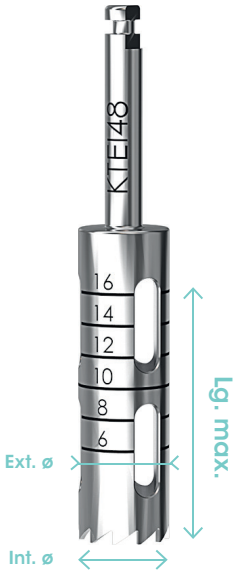

 Instrumentos específicos para la gama de implantes de Ø 3 mm.

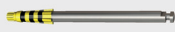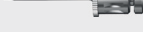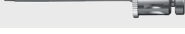	Referencia	Descripción	Diámetro del implante	Cortoitud
	K30MPICA	Transportador de implante para contraángulo	Ø 3.0 mm	
	KMPICAC	Transportador de implante para contraángulo	Otro Ø	Corto
	KMPICAL			Largo
	KMPICAXL			Extra Largo
	K30MPI	Transportador de implante	Ø 3.0 mm	
	KMPIC	Transportador de implante	Otro Ø	Corto
	KMPIL			Largo
	KMPIXL			Extra Largo
	TCAS	Destornilladores de contra-ángulo		Corto
	TCA			Estándar
	TCAL			Largo
	1028	Extensión de fresa*		
	1032S	Destornillador manual		Corto
	1032		Estándar	
	1032L		Largo	
	1032XL		Extra Largo	
	KCCD	Llave de torque para cirugía		
	KCCDL	Llave de par de torsión larga para cirugía		
	KJP30	Terminal de medidor de profundidad de perforación	Ø 3.0 mm	
	KJP36	Terminal de medidor de profundidad de perforación	Ø 3.6 mm	
	KJP42		Ø 4.2 mm	
	KJP48		Ø 4.8 mm	
	KJP54		Ø 5.4 mm	

*El 1028 no debe utilizarse con transportador de implantes, ya que esto puede causar la rotura del dispositivo.

 Opcional por TROUSSEKONTACT
 Opcional por TROUSSEKONULTI

 Instrumentos específicos para la gama de implantes de Ø 3 mm.

FRESAS CORTICALES CON GUÍAS DE IMPLANTE


Compatible con los implantes *Kontakt* y *Kontakt N*, la fresa cortical puede utilizarse para eliminar el exceso de hueso supraimplantario si es necesario y para asegurar que los tornillos de cicatrización o los pilares rectos o angulados estén correctamente colocados. La fresa cortical tiene una punta de centrado PEEK. Al colocarse en el implante, también estabiliza el instrumento durante la rotación y protege la conexión.

	Referencia	Descripción	Diámetro de las partes protésicas	Esterilización requerida	Número de usos recomendado
	KFC30	Fresa cortical para tornillo de cicatrización	Ø 3.0 mm	Sí	20
	KFC4-5	Fresa cortical estándar para tornillo de cicatrización	Ø 4.0 mm - Ø 5.0 mm	Sí	20
	KFC65		Ø 6.5 mm	Sí	20

 **Uso recomendado:** 200 rpm

 Instrumentos específicos para la gama de implantes de Ø 3 mm.


PROTOCOLO PARA FRESAS CORTICALES

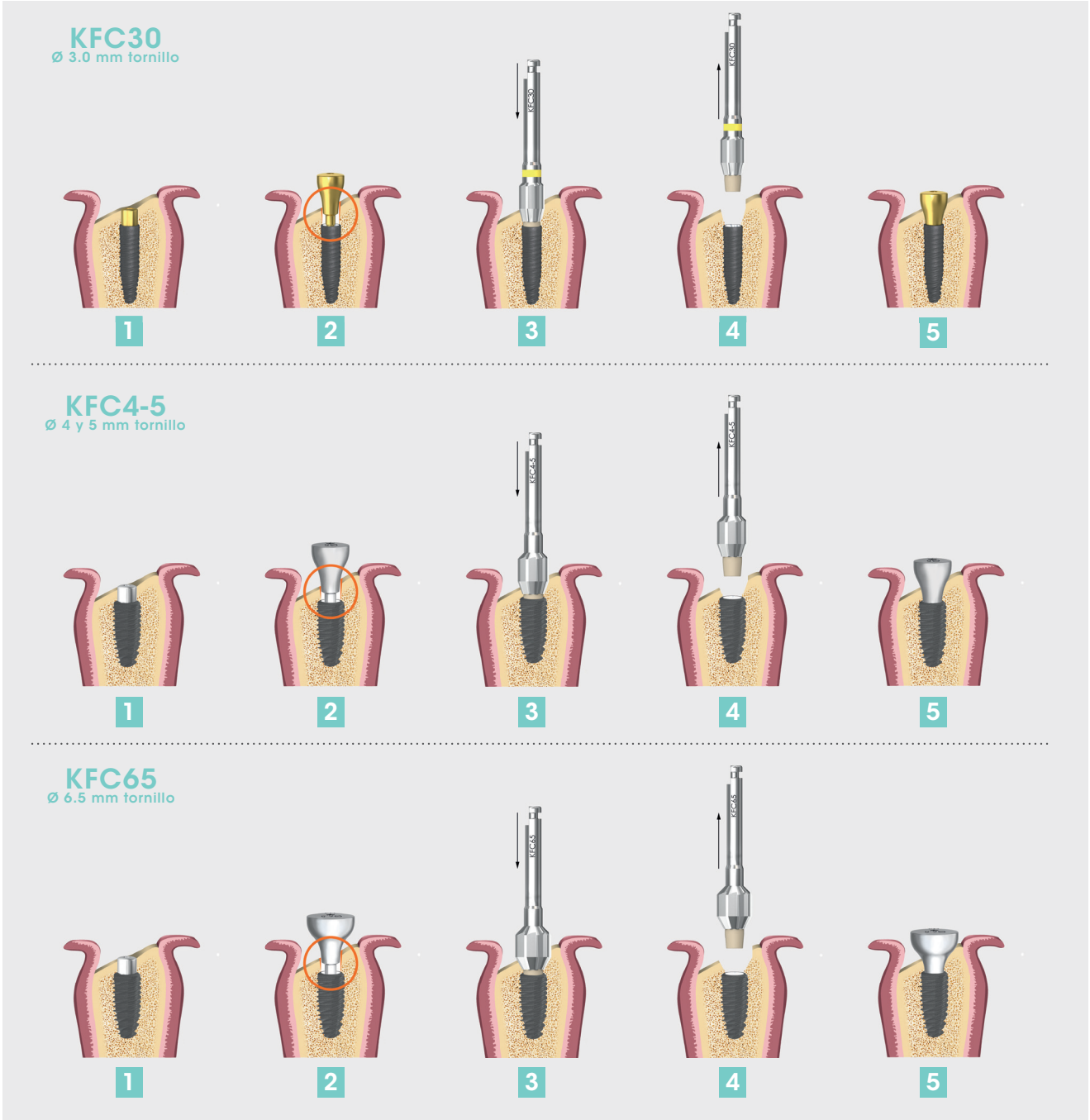

- 1 Retire el tornillo de cubierta del implante.
- 2 Si el tornillo encuentra exceso de hueso supra-implante, utilice la fresa cortical.
- 3 Inserte la fresa cortical en la conexión del implante. Velocidad de rotación de 200 rpm. No se requiere presión.
- 4 Retire la fresa cortical de la conexión del implante.
- 5 Coloque el tornillo de cicatrización.

3. Protocolos de colocación


Un anillo de color en las fresas facilita la identificación del diámetro de implante al que corresponde.

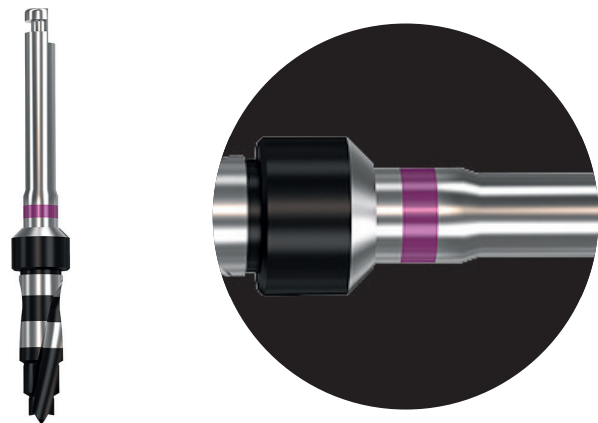

COLORES	DIÁMETRO (MM)
	3.0
	3.6
	4.2
	4.8
	5.4

El diámetro y la profundidad de la fresa se establecen durante la planificación del tratamiento. Las fresas están claramente marcadas para indicar diferentes Cortoitudes de perforación.

CORTOITUDES DE LAS FRESAS

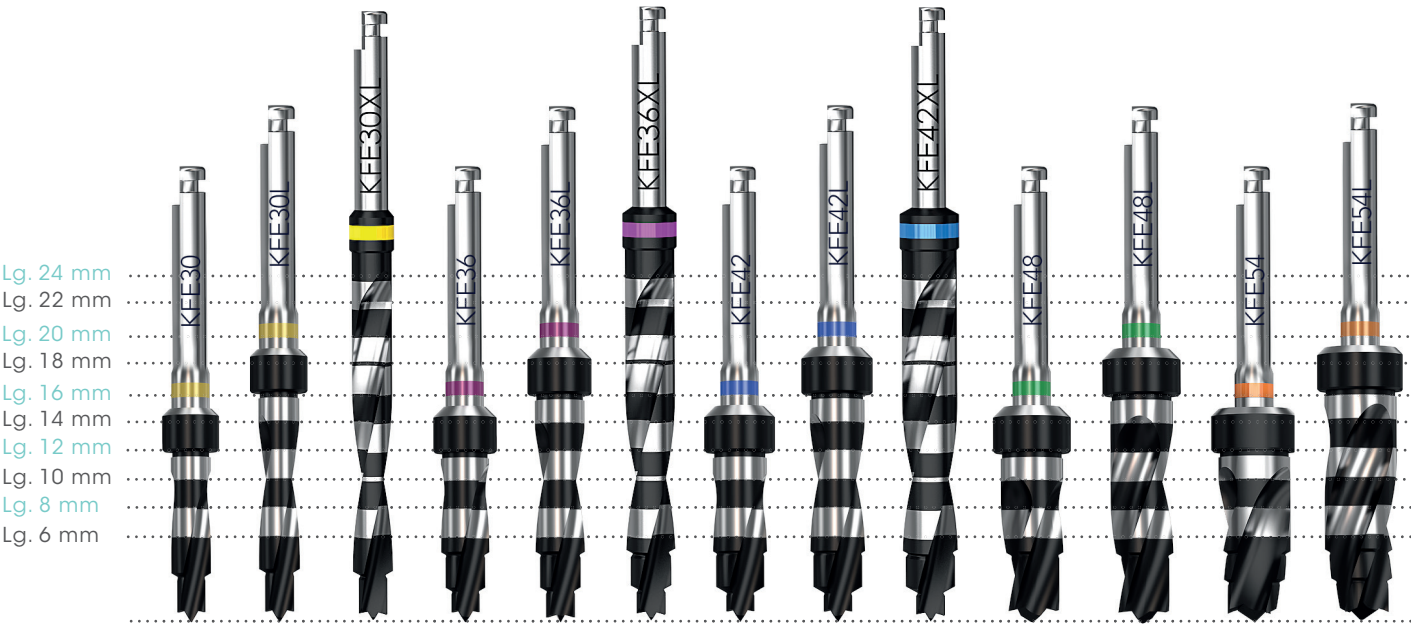


PASOS DE PERFORACIÓN

Implantes Kontakt	Ø 1.5 mm fresa de marcado	Ø 2 mm fresa piloto	Fresa Ø 3.0 mm	Fresa Ø 3.6 mm	Fresa Ø 4.2 mm	Fresa Ø 4.8 mm	Fresa Ø 5.4 mm	Fresas
	1,500 rpm		1,000-1,200 rpm			700-900 rpm		200 rpm
 Ø 3 mm								 KF30 (L)
 Ø 3.6 mm								 KF36 (L)
 Ø 4.2 mm								 KF42 (L)
 Ø 4.8 mm								 KF48 (L)
 Ø 5.4 mm								 KF54 (L)

PROTOSCOLOS DE FRESADO POR DIÁMETRO

Los protocolos de fresado son idénticos para los implantes Kontakt y los implantes Kontakt N.

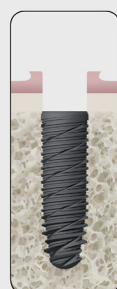

ADVERTENCIA


El implante se coloca 2 mm por debajo de la cresta para promover el crecimiento óseo en la plataforma del implante.

- Perfore 2 mm más profundo que la Cortoitud del implante para una colocación subcrestal recomendada de 2 mm.



Par de atornillado del implante: 80 Ncm como máximo
Velocidad de rotación recomendada: 15 rpm

Ø
3.0 mm

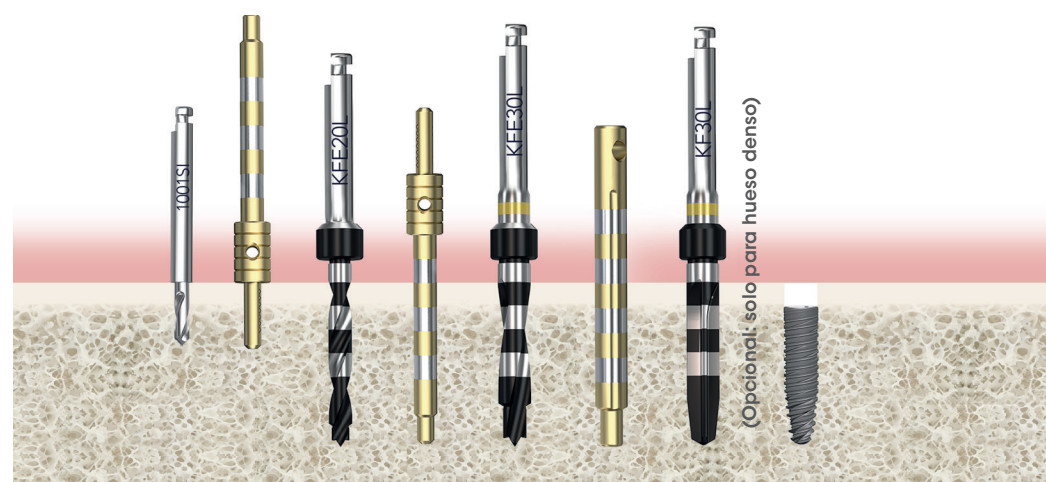

Ejemplo: K3012

Ø
3.6 mm



Ejemplo: K3612

Ø
4.2 mm




Ejemplo: K4212

Ø
4.8 mm



Ejemplo: K4812

Ø
5.4 mm

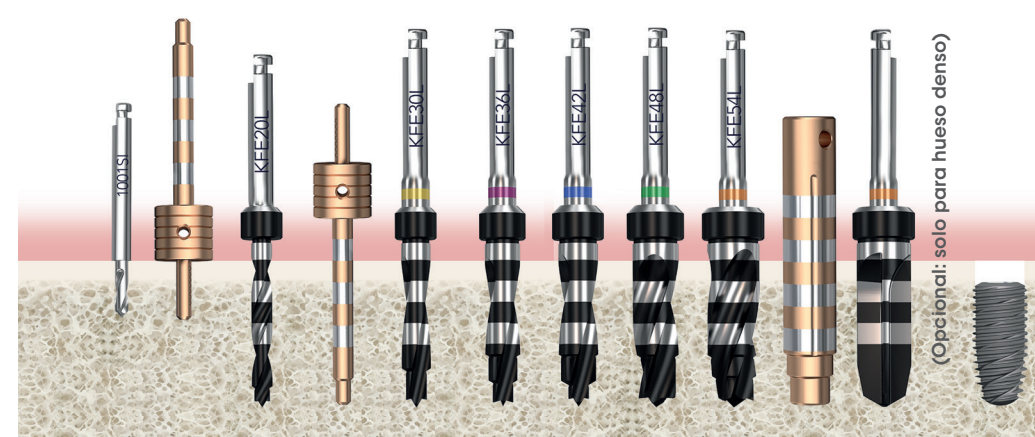


Ejemplo: K5412

4. Topes de fresa

Kit de topes de fresa Kontakt:

- Entregado en un kit específico y esterilizable.

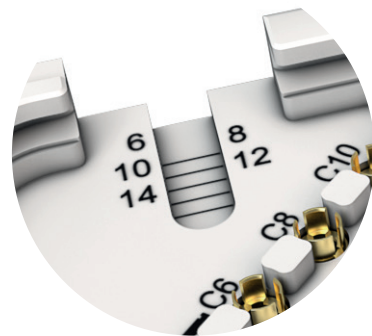


El kit incluye una regla para que el cirujano pueda **verificar la Cortedad de trabajo de la fresa.**

Los topes son removibles, esterilizables y están disponibles para fresas cortas y largas.

MARCADO DE TOPES DE FRESADO

C8L12 por ejemplo:

- La fresa corta permite la colocación de un implante de 8 mm (C8).
- La fresa larga permite la colocación de un implante de 12 mm (L12).

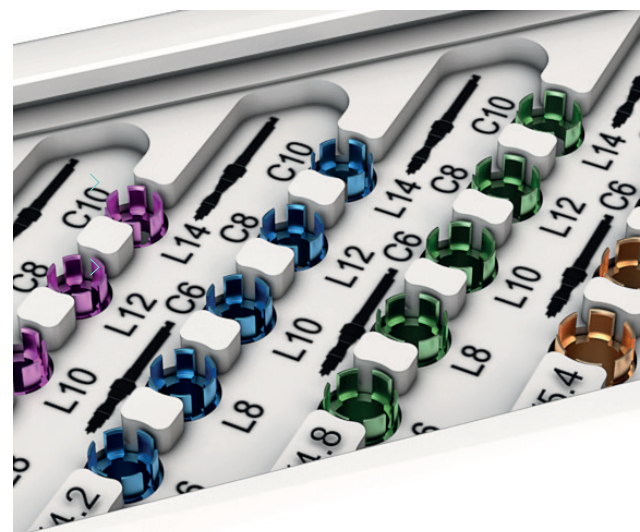

COLOCACIÓN DEL TOPE DE FRESA

- Topes específicos que se pueden acoplar a las fresas para engancharse directamente con el contraángulo.



RETIRAR EL TOPE DE POSICIÓN

Se ha desarrollado un sistema que se adapta a todos los diámetros de los topes para retirar los componentes de la **fresa sin el riesgo de contaminar o dañar los guantes del profesional.**

Inserte la fresa y el tope en la muesca en el lado derecho del kit y tire de la fresa hacia la derecha para liberar el tope.

Una vez retirado, el tope se colocará en el kit.



Estos kits son autoclavables.


Ciclos recomendados:
(UE) 134°C - 3 min / (FR) 134°C - 18 min.
Tiempo de secado: 20 min.

No utilizar calor seco.

5. Calibrador de tejido periodontal

> Calibrador de tejido periodontal

	Referencia	Descripción
	KJTP	Calibrador de tejido periodontal

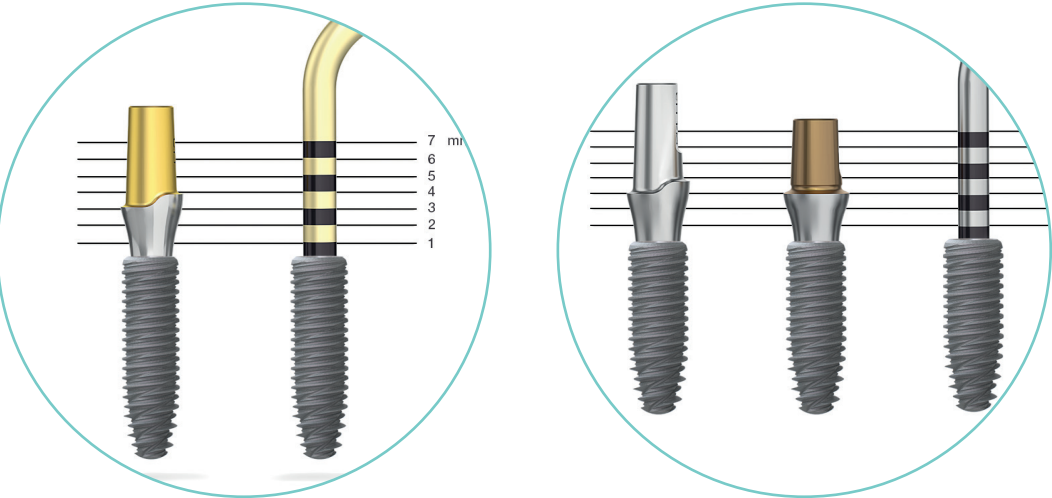


Colocado sobre el implante sin dañar la conexión

6. Tornillos de cicatrización

Altura gingival



Limpie bien el interior del implante antes de insertar el tornillo de cicatrización.

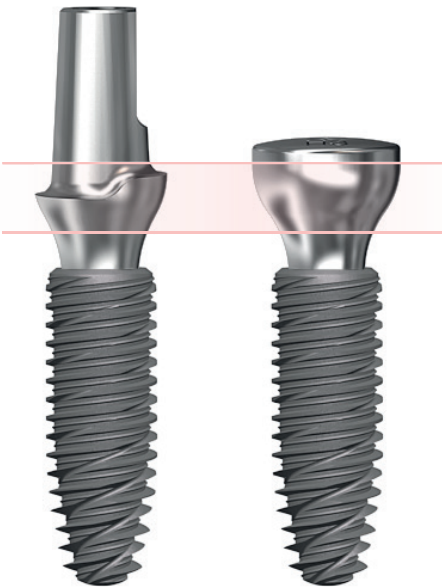


Encía

Ejemplo con: Ht. 3 mm

	Referencia	Descripción	Diámetro	Altura
	K30VC	Tornillo de cicatrización	Ø 3.0 mm	1.5 mm
	K30VC3			3 mm
	K30VC4			4 mm
	K30VC5			5 mm
	KVC361	Tornillo de cicatrización	Ø 3.6 mm	1 mm
	KVC362			2 mm
	KVC363			3 mm
	KVC364			4 mm
	KVC365			5 mm
	KVC401	Tornillo de cicatrización	Ø 4.0 mm	1 mm
	KVC402			2 mm
	KVC403			3 mm
	KVC404			4 mm
	KVC405			5 mm
	KVC501	Tornillo de cicatrización	Ø 5.0 mm	1 mm
	KVC502			2 mm
	KVC503			3 mm
	KVC504			4 mm
	KVC505			5 mm
	KVC652	Tornillo de cicatrización	Ø 6.5 mm	2 mm
	KVC653			3 mm
	KVC654			4 mm
	KVC655			5 mm

 Instrumentos específicos para la gama de implantes de Ø 3 mm.

> Kit de tornillos de cicatrización

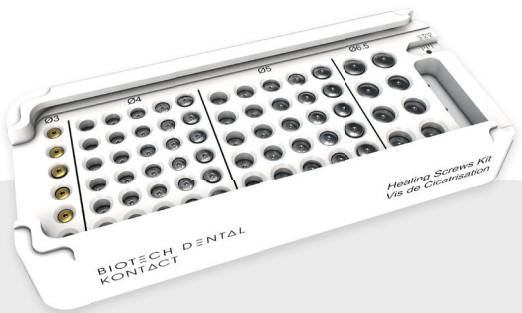

Ref.: KVCK



3

3

Kit protésico Kontakt:

Los accesorios necesarios para la parte protésica están incluidos en el kit protésico Kontakt.

Este kit también incluye una llave de par que cubre los rangos de par necesarios para la prótesis (10 a 20 Nm).




Ref.: KPK

DESTORNILLADOR PROTÉSICO

Destornillador manual hexagonal para atornillar las partes protésicas.

Disponible en versión corta
y larga.

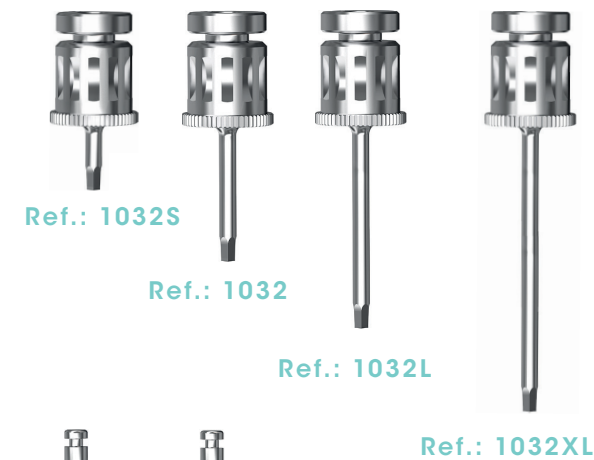

**Destornillador de
contraángulo.**

Disponible en
versión corta y larga.




LLAVE DE TORQUE PROTÉSICO

Para el apriete manual de las piezas protésicas.

Cubre los rangos de torque necesarios para la prótesis (10 a 20 Ncm)
Se desbloquea cuando se alcanza el torque.

Precaución: las piezas protésicas deben atornillarse de acuerdo con las recomendaciones de este manual. Después de su uso, ajuste la llave de par de torsión a 10 Ncm.

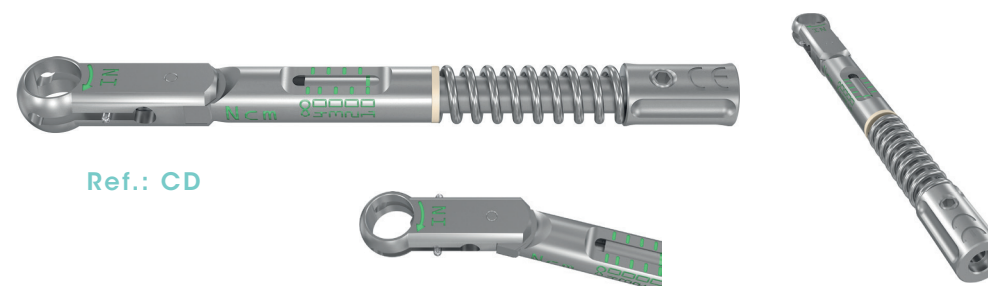

Consulte las instrucciones del fabricante disponibles en www.josefganter.de para el desmontaje y la limpieza de la llave de par de torsión.

NOTAS

[illegible]

NOTAS

[illegible]

4

INFORMACIÓN GENERAL

Pedidos e información

Para realizar un pedido o para cualquier solicitud, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Tel.: (+34) 91 085 85 40

E-mail: info-spain@biotech-dental.com

Horario de apertura

8.30am-5.30pm Lunes a Juves

8.30am-4.30pm Viernes

Cualquier pedido realizado antes de las 4 p.m. se entregará dentro de 48 horas (días laborables), dependiendo de su ubicación.

Contacto

Servicio de atención al cliente

Tel.: (+34) 91 085 85 40

E-mail: info-spain@biotech-dental.com

Formación

Para más información, contacte con su asesor comercial.



BIOTECH DENTAL



305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tel.: +34 91 193 02 10

Fax: +34 91 085 85 40

CustomerService@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com

www.galaxybiotech.com



AFNOR Cert. 73017

Responsable: Biotech Dental Spain S.L. / B87313334 / Avenida Juan Caramuel 1, 28919 Leganés, Madrid / info-spain@biotechdental.com / 911930210 | Finalidad principal: Gestionar la relación comercial/profesional. Atender las consultas o la información que nos solicita. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y del todo sobre nuestra política de privacidad en <http://www.biotech-dental.com/> es o escribiendo al correo electrónico infospain@biotech-dental.com | Confidencialidad: Si Ud. no es el destinatario y recibe este mail/fax por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato el mail/fax por error recibido con todos sus documentos adjuntos sin leerlos ni hacer ningún uso de los datos que en ellos figuren, ateniéndose a las consecuencias que de un uso indebido de dichos datos puedan derivarse.