

MYC SIMPLE

**El dispositivo que guía el crecimiento,
reeduca las funciones orofaciales y acompaña el
tratamiento de ortodoncia.**



Previene y trata las
maloclusiones de forma
natural

**¿A quién va
dirigido?**

**A partir de los 3 años,
niños y adolescentes con:**

respiración bucal,
deglución atípica,
malposiciones dentales.

¿POR QUÉ UTILIZAR MYOSIMPLE?

Durante la infancia y la adolescencia, ciertas funciones orofaciales —como la respiración, la deglución o la postura de la lengua— pueden verse alteradas. Estos trastornos funcionales, conocidos como disfunciones orofaciales, pueden afectar al desarrollo facial, la postura y la calidad del sueño, así como a la alineación dental y la estabilidad oclusal.

MyoSimple es un dispositivo de reeducación miofuncional diseñado para restaurar el equilibrio orofacial (respiración, deglución, postura de la lengua) al tiempo que guía positivamente el crecimiento dentofacial. Al intervenir de forma temprana, contribuye a desbloquear la oclusión y a prevenir maloclusiones, facilitando o preparando así un posible tratamiento de ortodoncia.

MyoSimple también es muy útil para facilitar la transición entre una fase inicial de tratamiento ortopédico y una fase posterior de ortodoncia.

CÓMO FUNCIONA MYOSIMPLE

MyoSimple es un dispositivo de rehabilitación miofuncional. Una vez en la boca, favorece:

- la respiración nasal en lugar de la bucal,
- una posición elevada de la lengua,
- una deglución correcta,
- una buena alineación dental.

Se utiliza principalmente por la noche, pero también, según la indicación del profesional, durante unas horas durante el día —especialmente mientras se realizan actividades tranquilas como leer, hacer deberes, viajar o utilizar dispositivos electrónicos.



El tiempo medio de tratamiento es de 6 a 12 meses, pero puede variar en función de las necesidades individuales. Su profesional le asesorará sobre la duración adecuada.



CUIDADOS


El dispositivo debe limpiarse con un cepillo de dientes y pasta dental antes y después de cada uso.

Consejo: si el aparato se cae durante la noche (lo cual es normal al principio), no hay que preocuparse, sino, simplemente, proseguir con el tratamiento. El uso regular ayudará a la adaptación. Si es necesario, se puede aplicar una tira adhesiva suave (como un Steri-Strip) en los labios para ayudar a mantener la boca cerrada durante la noche.

COLOCACIÓN

El marcador «A» se coloca delante de los dientes superiores.

El marcador «B» se coloca delante de los dientes inferiores.

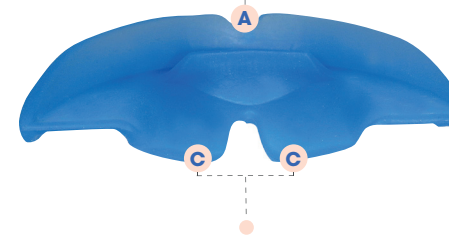

La lengua se posiciona elevada contra el paladar, gracias a la rampa lingual.

EJERCICIOS ADICIONALES

Para mejorar la eficacia del dispositivo, el profesional puede sugerir ejercicios sencillos centrados en:

- respiración nasal,
- postura lingual,
- deglución,
- y habla.

Estos ejercicios deben realizarse diariamente, durante un promedio de 5 a 10 minutos al día, según las recomendaciones del profesional.

PUNTOS CLAVE A RECORDAR



UTILIZACIÓN DE MYOSIMPLE TODAS LAS NOCHES



USO DIARIO: 1-2 HORAS

durante una actividad tranquila



Limpieza del aparato por la mañana y por la noche



Realización de ejercicios diarios
si se prescriben



CONTACTO INMEDIATO CON EL PROFESIONAL
en caso de pérdida, molestia o dolor



BIOTECH DENTAL
ORTHO

MYOSIMPLE

MYOSIMPLE

es un producto sanitario fabricado íntegramente en Francia.

Libre de látex, ftalatos,
disruptores endocrinos y bisfenol.
Certificado CE.

Todos nuestros dispositivos se envasan en
centros especiales de empleo



SABER MÁS

contact@myosimple.com
www.myosimple.com



Sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) con un capital de 125.000 € -
Registro Mercantil de Salon de Provence: 801 674 375 - SIRET: 801 674 375 00010 - N° IVA: FR 93 80 167 437 5.
Imágenes no contractuales. No arrojar a la vía pública. Impreso por VALLIERE - 163 Avenue du Luxembourg -
ZAC des Molières - Miramas - Francia.

Lea atentamente las instrucciones del prospecto suministrada
con el producto sanitario. MYOSIMPLE - Productos sanitarios de Clase I - CE
Biotech Dental Smilers - 305 Allées de Craponne -
13300 Salon-de-Provence - Francia