

LOS PASOS PARA RECUPERAR TU SONRISA



1. Impresiones

Toma de impresiones de tus dientes.

2. Configuración del tratamiento

Se propondrá un **plan de tratamiento** detallado (número de alineadores necesarios, duración y coste del tratamiento) y vídeo **antes/después**¹. Tus alineadores están hechos a medida.

3. Tratamiento diario

Tiempo de tratamiento: variable según su complejidad, normalmente **de 6 a 24 meses**. Los alineadores deben usarse diariamente durante **22 h/día durante 2 a 3 semanas** (1 semana de uso si se usa el dispositivo ATP38² Miracle). Te quitas los alineadores solo cuando comes.

4. Retenedores

Una vez finalizado el tratamiento, **cuida tu sonrisa** con retenedores personalizados. retainers.

[1] Este vídeo es una simulación de tratamiento. El cumplimiento de las instrucciones de uso del dispositivo y el cumplimiento del plan de tratamiento elaborado por el profesional sanitario son fundamentales para obtener el resultado esperado. Es posible que se requieran fases adicionales.

[2] Al-Dboush, Ra'ed, Anahita Naseri Esfahani, et Tarek El-Bialy. « Impact of photobiomodulation and lowintensity pulsed ultrasound adjunctive interventions on orthodontic treatment duration during clear aligner therapy ». The Angle Orthodontist 91, n°5 (september 2021): 619-25.

smilers

Biotech Dental Spain

Avenida Juan Caramuel,
1 - Parque Científico
Leganés Tecnológico,
28919 Madrid



+34 910 85 85 40



info@smilers.com



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
www.smilers.com



Smilers_Aligners



Smilers Aligners



www.smilers.com

Biotech Dental Smilers es una empresa con sólidos valores, comprometida con brindar una «sourire chic» francés a todos.

SELLO DEL MÉDICO



AFNOR Cert. 73017

Alineadores fabricados por Biotech Dental Smilers. Dispositivos médicos a medida de clase IIa para alineación dental. Lea atentamente las instrucciones de los prospectos. Busque el consejo de su médico. ATP38 fabricante: Swiss Bio Inov - Distribuido por: Biotech Dental. Dispositivo médico de clase IIa. CE0459. Tecnología para aplicaciones médicas: analgésico, antiinflamatorio, cicatrizante. CE0459. Lea atentamente las instrucciones. Debe ser utilizado por profesionales de la salud cualificados y capacitados. Busque el consejo de su médico. Las imágenes son solo para fines de representación. Biotech Dental Smilers - Biotech Dental Smilers - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence - Francia. Una empresa francesa bajo la ley francesa con un capital de 125 000 € - Registro comercial Salon-de-Provence: 801 674 375 - SIRET: 801 674 375 00010 - Número de IVA: FR 93 80 167 437 5. No arrojar en áreas públicas - Imprimerie Valliere - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas.

sm;)ers

RECUPERA EL
**PODER DE TU
SONRISA**



www.smilers.com

¿CÓMO FUNCIONAN LOS ALINEADORES TRANSPARENTES?

Los alineadores Smilers **corrigen las malposiciones dentales** para **recuperar una alineación** armoniosa y funcional. Son **removibles, transparentes** y hechos a la medida de sus dientes.

Aplican **fuerzas mecánicas** ligeras para darte la sonrisa con la que sueñas.

MUCHOS CASOS TRATABLES



En algunos casos, su médico puede necesitar :

- ▶ Añadir pequeños puntos de resina llamados **ataches** adjuntos para **facilitar algunos movimientos**.
- ▶ Realizar **stripping***: limar unas décimas de milímetro de esmalte para permitir algunos movimientos. **Esta práctica es indolora**.

*reducción interproximal



EXPERIENCIA DENTAL EN EL CENTRO DEL TRATAMIENTO



Debido a que los dientes no vuelven a crecer, es esencial alinearlos con la experiencia de un profesional de la salud, quien se asegurará de que el tratamiento se realice correctamente para obtener resultados óptimos.



ECO-RESPONSABILIDAD

Nuestros alineadores **no contienen bisfenol**, su embalaje es **reciclable** y nuestros folletos están impresos con **tinta vegetal**.

CALIDAD
MADE IN FRANCE



► **Alineadores inspirados en la Alta Costura francesa para tu comodidad:**

- Producido en nuestra fábrica de **alta tecnología** en Salon-de-Provence
- Corte **preciso** para proporcionar un bordemás suave
- Pulido a mano en nuestro taller Smilers

► **Una impresión totalmente lisa que evita los depósitos y conserva la claridad día tras día.**

Nuestra fábrica cuenta con la **certificación ISO 13485**, lo que demuestra la producción cualitativa de nuestros alineadores transparentes.



Alineador Smilers comparado con alineador de competencia, después de una semana en café.