

SSA-GF DESCRIPCIÓN GENERAL

PRÓTESIS
ÚNICA



IMPLANTES

Kontakt™



- Ø 3.6
- Ø 4.2
- Ø 4.8
- Ø 5.4

Kontakt™ S



- Ø 3.6
- Ø 4.2
- Ø 4.8
- Ø 5.4

Kontakt™ S+



- Ø 3.6 / 4.0
- Ø 3.6 / 4.5
- Ø 4.2 / 4.5
- Ø 4.2 / 5.0
- Ø 4.2 / 5.4

Kontakt™ N



- Ø 3.6
- Ø 4.2
- Ø 4.8
- Ø 5.4



SOPORTE PARA IMPLANTE


CA Manual
KMPICAC KMPIC
KMPICAL KMPIL

PILARES SSA-GF


MD Mandibular Molar



8.0 mm

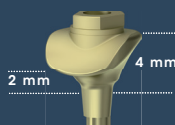

KPSSAMD5020

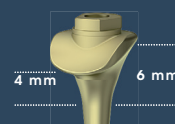

KPSSAMD5040


MX Maxillary Molar



9.0 mm




KPSSAMX5020

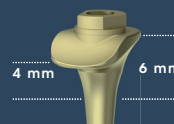


KPSSAMX5040


U Universal

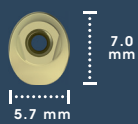

7.0 mm

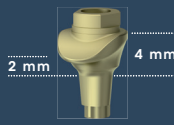

KPSSA5020

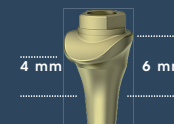

KPSSA5040



DESTORNILLADOR

CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L

Tornillo de fijación
SSAGF para atornillado
secundario del tapón
y corona digital
KPOPVCTV



TI-BASES

Ø 5 diámetro

GH	CH	REFERENCIAS	COMPATIBILIDAD
1 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM5010 KPCADCAM5010-L	••
2 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM5020 KPCADCAM5020-L	••
3 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM5030 KPCADCAM5030-L	••••
4 mm	4 mm 5.5 mm	KPCADCAM5040 KPCADCAM5040-L	••••

Ø6.5 diámetro

GH	CH	REFERENCIAS	COMPATIBILIDAD
2MM	4 MM 5.5 MM	KPCADCAM6520 KPCADCAM6520-L	••
3MM	4 MM 5.5 MM	KPCADCAM6530 KPCADCAM6530-L	••••
4MM	4 MM 5.5 MM	KPCADCAM6540 KPCADCAM6540-L	••••
5MM	4 MM 5.5 MM	KPCADCAM6550 KPCADCAM6550-L	••••



DESTORNILLADOR

CA Manual
TCA 1032
TCAL 1032L

IMPRESIÓN

Scanbody



INTEGRADO DIRECTAMENTE
EN SSA-GF

LIBRERIA
DISPONIBLE

BIOTECH DENTAL
DIGITAL

+33 (0)4 65 84 46 56

Análogo



DIGITAL

34_613_165_01-02

Tornillo de laboratorio



KVPL

PROTOCOLO NEW-GENERATION SSA-GF


1ª SESIÓN: Colocación de implante inmediata postextracción



Extracción




Colocación de implantes intraseptales

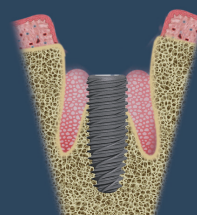

Relleno óseo a nivel del cuello del implante:


Por favor, asegúrese de que la conexión esté completamente accesible.

Selecciona y personaliza el composite

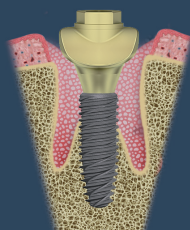


Selección de la forma y ajuste del pilar **SSA-GF***.

Ajuste del relleno óseo.

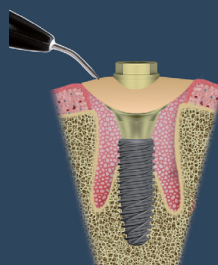


Agregue composite para igualar el contorno gingival o producir un tapón/corona provisional sellada (en un plazo de 1-2 días).

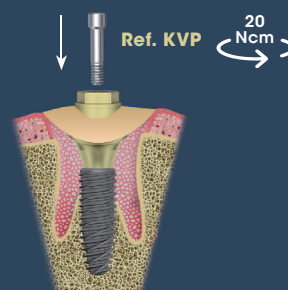

Atornillado con el tornillo de fijación **Ref. KVP**, y con el destornillador **Ref. 1032** o **Ref. TCA**

2ª SESIÓN (3/4 meses)

Impresión

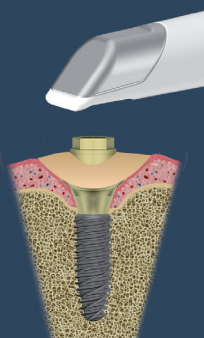

Impresión digital


En el laboratorio




Producción de corona sobre implante Ti-Base (**Ref. KPCADCAMxx**) o con pilar a medida digital de Biotech Dental

3ª SESIÓN

Corona permanente

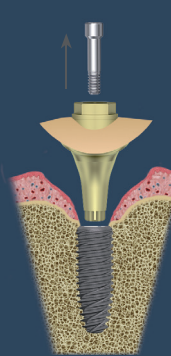

Retirada del pilar SSAGF utilizando el extractor de pilares **Ref. KEX**

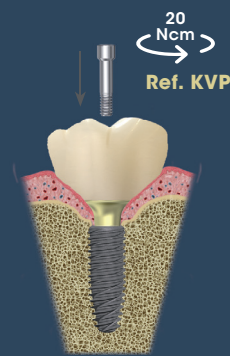

Colocación de la corona definitiva
CUIDADO: utilice un tornillo NUEVO Ref. KVP

Instrumentos necesarios para el protocolo:

Extractor de pilar



KEX

Destornillador hexa.1.20



1032



1032L



TCA

*Pilar de sellado de la cavidad - Ajuste gingival

**Siga el protocolo recomendado por el fabricante del composite